


# Index

1. A tervezés célja
2. ZV-42W beállítások vs egyéb gyártók beállításai
3. **Frissítés** Termékspecifikációk
4. **Frissítés** A ZV-42W telepítésének lépései
5. További tartozékok a ZV-42W-hez
6. A telepíthető egységek mérete és száma
7. A ZV-42W telepítése
8. A ZV-42W és az AK-1 kombinált használata
9. **ÚJ** A felhasználói kézikönyv elérése
10. **ÚJ** ZV-42W Millbox munkafolyamat

# 1. A tervezés célja

- Cél
  - A ZV-42W többcsapos befogó segítségével a felhasználó akár 6 kerámia, kompozit gyanta vagy PMMA pótlást is megmunkálhat egyszerre.

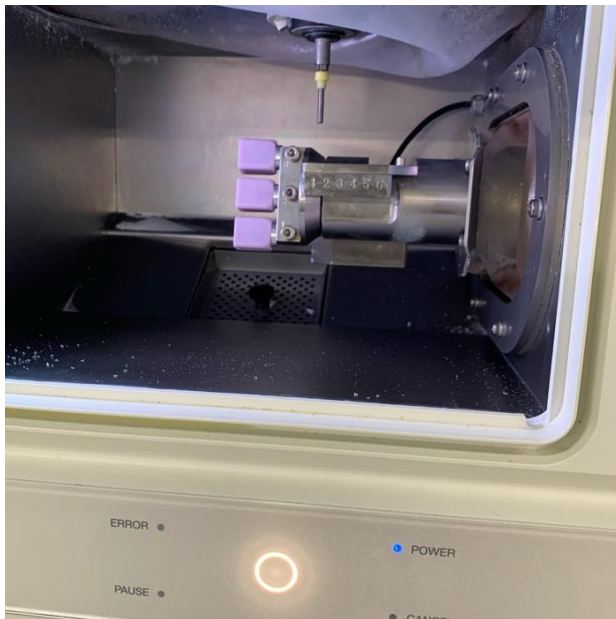









Meglévő rögzítő  
rész



ZV-42  
W  
bilincs

## 2. ZV-42W beállítások vs egyéb gyártók beállításai

|                           |  |  |  |  |
|---------------------------|--|--|--|--|
|                           | <br> | <br> | <br> | <br> |
| Terméknév                 | DWX-42W  | CORiTEC one  | Ceramill mikro ic  | Z4   |
| A megfelelő blokkok száma | 3 pcs.   | 3 pcs.   | 1 pcs.   | 1 pcs.   |
| Többcsapos befogó opciók  | ZV-42W (6 pcs.)  | ×  | 3x Milling AG (3 pcs.)   | ×  |

### 3. Termékspecifikációk

| Tétel                          | Tartalom  | Megjegyzések  |
|--------------------------------|---|---|
| A termék áttekintése           | Akár hat blokk befogására alkalmas befogó                                 |   |
| Célmodell                      | DWX-42W   | DWX-4W nem támogatott   |
| Kombináltan használható opciók | AK-1  |   |
| Támogatott CAM                 | Millbox, hyperDENT  | Hamarosan megjelenik<br>* A WorkNC és a GO2cam nem támogatott |
| A termék összetétele           | Többcsapos befogó, hatszögletű csavarkulcs, felhasználói kézikönyv QR-kód |   |

## 4. A ZV-42W telepítésének lépései

1. Telepítse a ZV-42W-t a kézikönyv szerint

2. Frissítés

- CAM
  - Millbox for DGSHAPE Wet Mills v4.2.x(2020), vagy újabb verzió
  - hyperDENT service pack 1 for 9.1, vagy újabb verzió
- Firmware V3.00, vagy újabb verzió
- VPanel V3.8.1, vagy újabb verzió

## 5. További tartozékok a ZV-42W-hez

① Többcsapos befogó


Alkotóelem

Tartó

A csavarok már részei

Alap

Szerelőcsavarok



Hatszögletű csavarkulcs



**ZV-42W** DGSHP

Information for ZV-42W User's Manual  
ZV-42W ユーザーズマニュアル

You can view and download the electronic manual.  
\* You can also view this website from your mobile device.

電子マニュアルは、下記URLからダウンロードすることができます。  
\*当サイトはスマートフォンからも閲覧可能です。

<http://www.dgshp.com/ZV-42W>

**SAMPLE**




③ Felhasználói kézikönyv QR kód

# 6. A telepíthető egységek mérete és száma

- A jobb oldali ábra mutatja a csatlakoztatható egységek számát a munkadarab méretétől függően.
- A PMMA anyagok és tartók telepítésével kapcsolatos további információk a DWX-42W felhasználói kézikönyvben találhatóak.




※Ha a vágást \* 1 körülmények között végzi, ne használja a tartót.

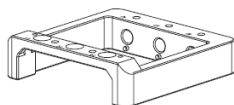


Ellenkező esetben az orsó ütközhet a tartóval, és az orsó károsodásához vezethet.

|   |   |
|---|---|
| Szélesség; 18 mm vagy kevesebb<br>Mélység; 15,85 mm vagy kevesebb | Szélesség; 18 mm vagy több<br>Mélység; 15,85 mm vagy kevesebb * 1 |
|   |   |
| Mélység; Legalább 15,85 mm (PMMA stb.) * 1                        | Tartókészlet (AK-1) * 1   |
|   |   |

# 7. A ZV-42W telepítése

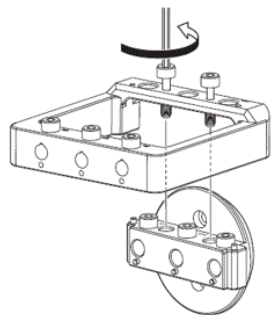


**1** Lazítsa meg a két csavart, amíg a tartó ki nem szabadul az alapból.

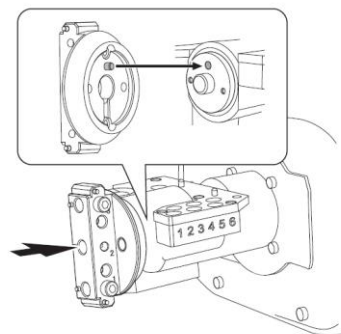


**2** Csatlakoztassa a többcsapos befogót a forgó tengely egységhez.

Végezzen automatikus korrekciót


**3**

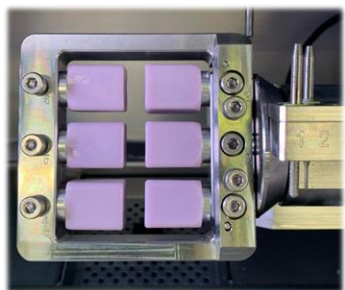


**7** A telepítés befejeződött.

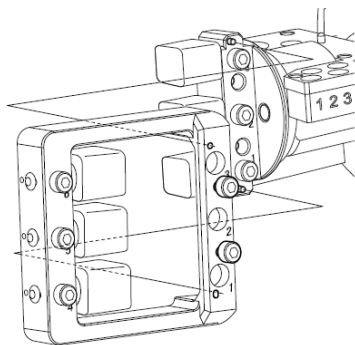

**6** Csatlakoztassa a tartót az alaphoz.

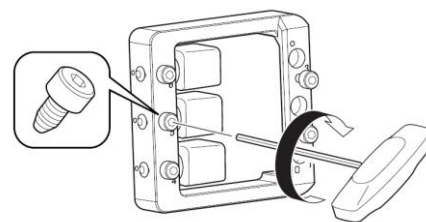

**5** Csatlakoztassa a munkadarabot a tartóhoz \*

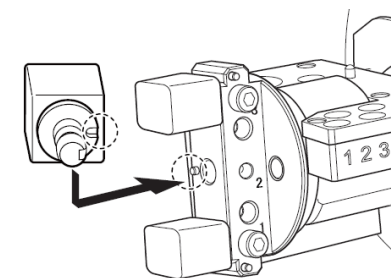


**4** Csatlakoztassa a munkadarabot egy többcsapos befogóhoz

\*A részletekért olvassa el a használati útmutatót.



## 8. A ZV-42W és az AK-1 kombinált használata

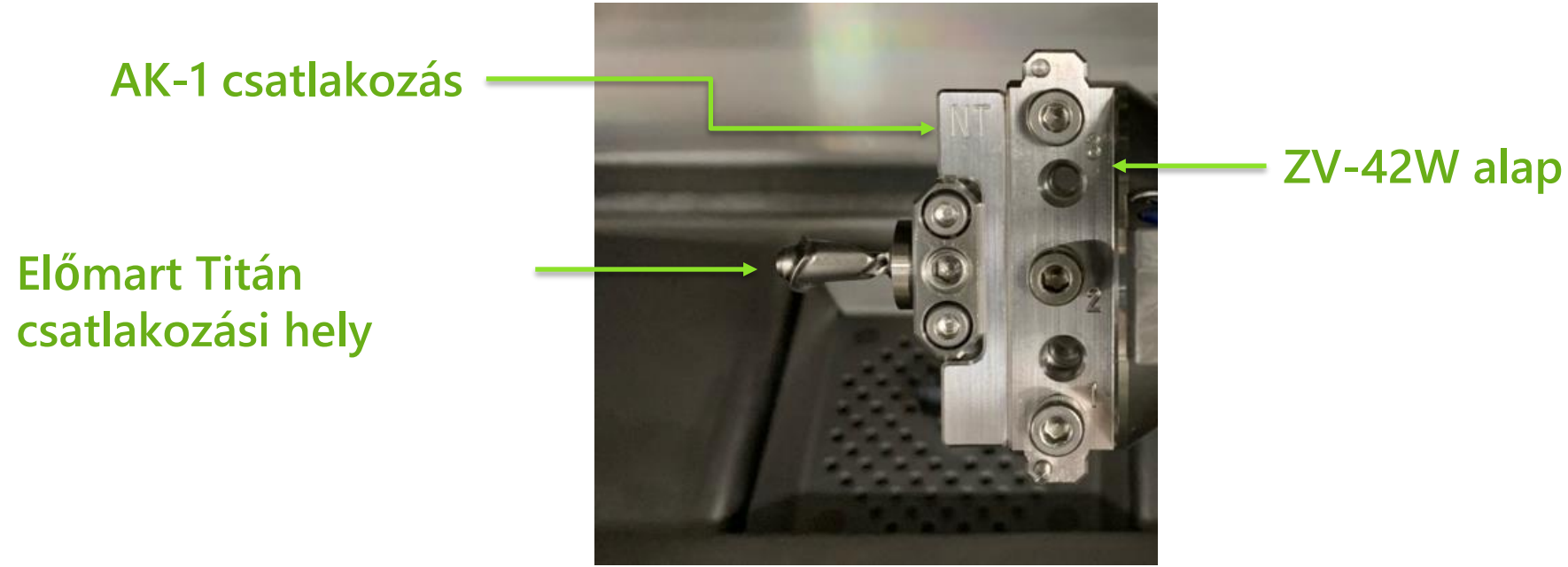

- ◆ A ZV-42W alapja használható az AK-1-el együtt.
  - ◆ Az AK-1 csatlakozó közvetlenül a ZV-42W alapjához rögzíthető..
- \*Az AK-1 használatának megismeréséhez olvassa el az AK-1 elsődleges információkat
- ! \***Az AK-1 használata esetén vegye le a ZV-42W tartóját.**

## 9. A felhasználói kézikönyv elérése

**ZV-42W** 



**Information for ZV-42W User's MANUAL**  
**ZV-42W ユーザーズマニュアルのご案内**

You can view and download the electronic-format manual from the following URL or QR code.  
\* You can also view this website from a smartphone.

電子マニュアルは、下記 URL または QR コードから閲覧およびダウンロードすることができます。  
\* 当サイトはスマートフォンからも閲覧することができます。

<https://downloadcenter.rolanddg.com/ZV-42W> 

Company names and product names are trademarks or registered trademarks of their respective holders.  
記載されている会社名、製品名は、各社の商標および登録商標です。  
Copyright © 2020 DGSHAPE Corporation  
<https://www.dgshape.com/>  
R1-201030

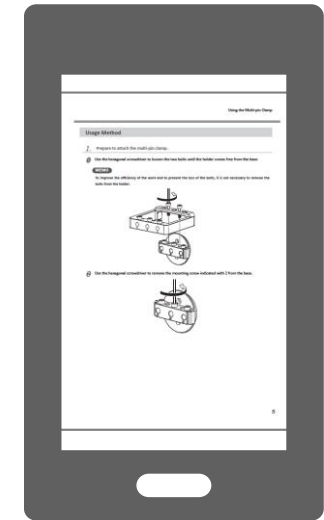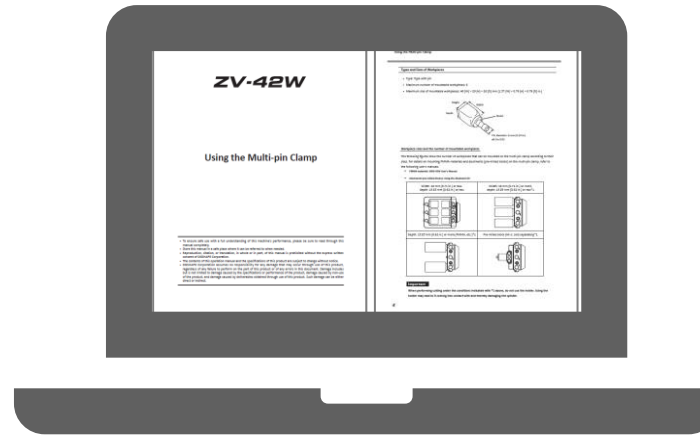

A felhasználói kézikönyv elérhető okoseszközről a QR-kód beolvasásával vagy az URL megadásával.


A termékhez QR-kódot és URL-t tartalmazó dokumentum tartozik.

Az elektronikus kézikönyv az indításkor jelenik meg.

**Használat előtt feltétlenül olvassa el a kézikönyvet.**

# 10. ZV-42W Millbox munkafolyamat

1. A DWX marógép és az anyag kiválasztása után válassza ki a ZV-42W-t és a helyzetét.

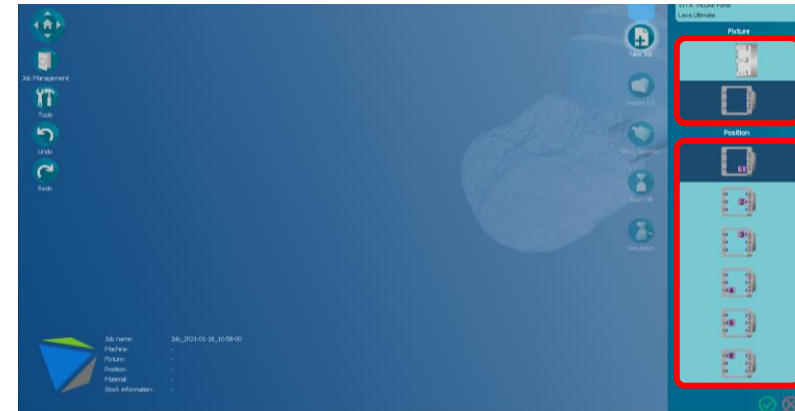


2. Válassza ki a felhasználást és a blokkot

## 10. ZV-42W Millbox munkafolyamat


3. Ha további alkalmazásokat szeretne hozzáadni,


4. kattintson  , majd kattintson  , vagy kattintson 

4. Válassza ki a pozíciót, ahová hozzá szeretné adni.

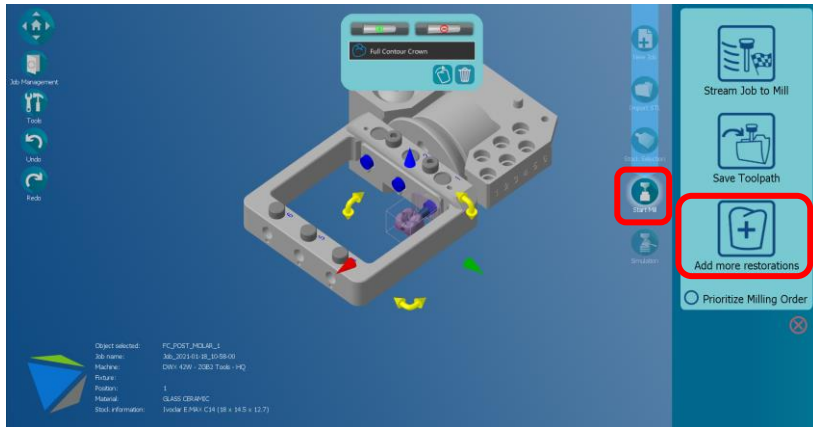

# 10. ZV-42W Millbox munkafolyamat

5. Az összes alkalmazás telepítése után kattintson  a számítás megkezdéséhez.

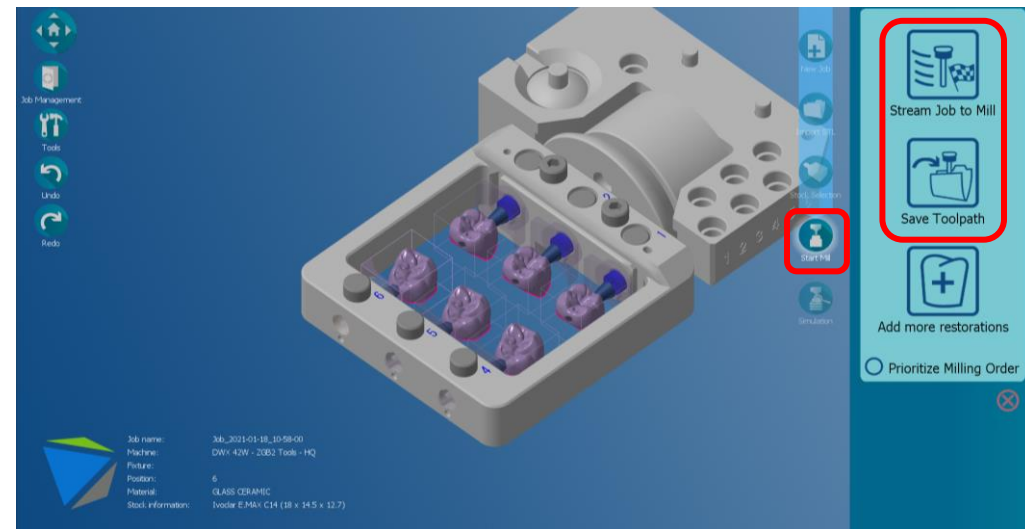



Empowering People to Shape the Future

Make Innovation, Make Life Better

Shape Ideas / Shape the Future / Shape Change